

犬だって




夏は暑いです!

冷やしわんこ3



冷やしわんこで
ペットの暑さ対策を!

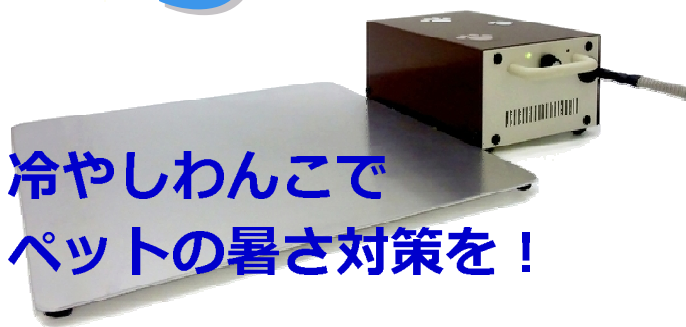

M: ¥68,000- (税込、送料込)

L: ¥76,000- (税込、送料込)

『冷やしわんこ3』の特長

1 室温よりも10℃冷えます

ペルチェユニットという電子装置で、アルミ板を強制冷却します。33℃の室温でも、アルミ板は23℃±1℃まで冷えますので、ペットはお腹や頭を冷やして快適に過ごせます。

3 Mサイズ・Lサイズが選べます

小型犬から大型犬まで対応したサイズを用意しました。
M: W36×D52×H11cm (板36×38cm)、約3.4kg
L: (横長) W60×D52×H11cm (板38×60cm)、約4.0kg
(縦長) W76×D36×H11cm (板60×38cm)、約4.0kg

5 電源入れっぱなしでも約650円/月

消費電力は、通電開始時は65Wですが、通常は約45Wで運転し、適温まで冷えると1Wになります。1ヶ月の電気代は、約650円と経済的です (27円/kWh: 全国家庭電気製品公正取引協議会の、2014年目安単価で試算)。

2 LEDで動作状態がわかります

LEDは、動作表示とエラー表示の2つを備えています。動作表示LEDは、冷却中は緑色・加温中は赤色・適温ではオレンジ色に点灯します。エラー表示LEDは正常時は消灯していますが、異常時には赤色で点灯します。

4 ご家庭でも車中でも使えます


電源は、ご家庭で使用できるAC電源アダプターと、車のシガーソケットで使用できるDCアダプターの両方を付属しています。なお、電源ケーブルは安全のため、齧り抑止チューブで被覆しています。

6 ペット酸素ハウスに収納できます

M,Lともに、ペット酸素ハウスに収納できる寸法です。ペットのお腹を強制冷却するので、動物病院や老犬・闘病犬の介護で課題とされていた、夏季の酸素ハウス内の温度管理に最適です。

『冷やしわんこ3』の種類

■冷やしわんこ3-M

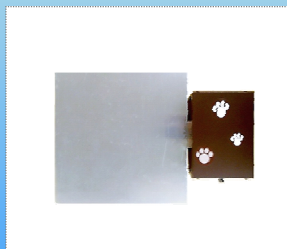


板サイズ：36cm×38cm
小型犬から中型犬まで

■冷やしわんこ3-L横



板サイズ：38cm×60cm
中型犬から大型犬まで

■冷やしわんこ3-L縦

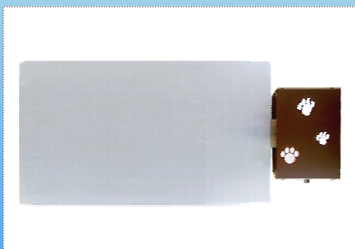

板サイズ：60cm×38cm
ペット酸素ハウス(L)に最適

■かまくら (ワグゾウ)



囲まれた狭い所が好きなネコやウサギ用です
(クッションフロア素材)

お客様の声

東京都 男性 Y.O様

柴犬とスピッツのミックス犬・ピーちゃん(女の子)、闘病中の夏バテ予防に購入しました。

これまで気化熱や冷蔵庫で冷やして涼しくなるジェルタイプを試しましたが、湿り気や乗り心地に違和感あるのか使ってくれなかった犬が、冷やしわんこには初日から毎日寝てます。アルミ板が玄関タイルと同じ感覚で快適なようです。

夜は一晚寝っぱなし。以前は2時間ごとにハアハア言いながら水飲みに起きてたのが、今は熟睡です。散歩帰りは水をがぶ飲みして、すぐ陣取ります。色々試した結果、アルミ板は最低温度に設定しています。クーラーをかけた室温が、23℃以下だと床で寝て、23℃以上だと冷やしわんこの上で寝ます。犬の意思で、自由に乗り降りできるのが、一番良いところだと思います。

結露対策は、飼い主の匂いが染み付いた古シャツをアルミ板カバーに敷いています。見た目はイマイチですが、シャツ幅がほぼアルミ板と同じなので着せる感覚で即カバーにできます。何より犬がくつろぎます。

買う前は、価格のハードルはとて高かったです。しかし、国内製の安心感、使い方のアドバイスや動作が不調になった際の対応、筐体に金属を多用したしっかりした作り、何より自分の犬が喜んで使ってるので、今は妥当と思えます。

『冷やしわんこ3』の主な仕様

項目	内容
使用場所	屋内（雨や水がかからないこと、直射日光が当たらないこと）
使用温度	Max. 33℃（35℃超で、本体排気部で低温やけどのおそれ）
設定温度	20℃～32℃（表面パネルのつまみで設定）
冷却能力	室温マイナス10℃（M: -10℃±1℃, L: -10℃±2℃）
消費電力	Max. 65W（通常は1W～45W）
定格電圧	DC12V 5A（AC電源アダプタ：AC100～240V 50/60HZ）
主な材質	アルミ（t=2mm）、SPCC（エポキシ焼付塗装）
原産国	日本製
保証期間	工場出荷日から1年間

老犬・闘病犬の熱中症対策に

当社は、大学や研究機関で使用するバイオ・環境の実験機器メーカーです。植物の生育環境を整える技術・ノウハウを、動物の熱中症対策製品に応用したものが、冷やしわんこです。ペルチェは、大手ディーラー向けに車用保冷温庫を手がける東京の専門メーカーから、板金や各部品は、東大阪・八尾の専門メーカーから揃え、当社で1台ずつ手作りしています。耐用年数の目安は、出荷実績から、12時間/日の連続使用で4年間以上としております。

そのこだわりが評価され、冷やしわんこは、ビルゲイツ財団と世界保健機構WHOが作った医療組織 FIND で、南インドの伝染病対策の実験機器としても、使用されています。

※『冷やしわんこ』は株式会社MRTの登録商標です。



本製品をご利用の際は、取扱説明書をよく読んで上でお使いください。改良のため、仕様はお断りなく変更することがあります。

企画・製造・販売



株式会社 MRT

〒581-0003 大阪府八尾市本町5-4-1 シティ八尾2F
TEL 072-992-5452 FAX 072-992-5542

インターネットでの製品説明・ショッピングサイトもご覧ください

<http://www.mrt-sensor.com/>

お問い合わせ先はこちら